

Slik tar du selvtest på ditt barn



Før du begynner

Vask hendene.

Innholdet i posen: I posen er det nok utstyr til å gjennomføre to tester.

Finn fram det du trenger til en test.


Rør med væske



1. Åpne testenheten. Legg den på et hardt underlag.



2. Åpne pakken med testpinnen

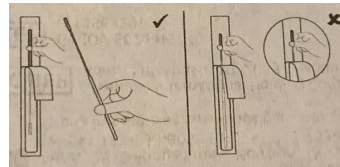

3. Åpne rør med væske. Legg det ned på et hardt underlag. Pass på at væsken ikke renner ut.



4. Ta testen. Før den absorberende spissen på testpinnen forsiktig inn i nesen til du kjenner motstand, men ikke lenger enn at hele spissen er inne i nesen.

Rør pinnen rundt på innsiden av neseboret 5 ganger.




Barn 7 år

Barn 11 år

5. Plasser testpinnen i røret med væske.

Rør rundt 6 ganger samtidig som du presser på røret. La testpinnen stå i røret i 1 minutt. Dra testpinnen opp samtidig som du klemmer på røret. Sett spissen på røret.

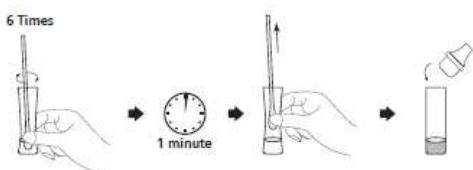

6. Drypp 4 dråper fra røret ned i

testbrønnen merket med S på testenheten. Svaret er klart etter 15 minutter (ta tiden).

